



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy |

Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 302228

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento

27/10/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: ABS022



Laccio Emostatico Rotondo in lattice naturale *Round tourniquet natural latex*

Fabbricante	CLINI-LAB S.R.L. , Via Seconda Strada 14, 35026 Conselve (PD) Italia	<i>Manufacturer</i>
CODICE del Fabbricante	013900	<i>Manufacturer ITEM CODE</i>
Descrizione:	Laccio emostatico rotondo, in lattice naturale, con orletti alle estremità <i>Round tourniquet natural latex, with hems at the ends</i>	<i>Description:</i>
Classificazione:	Dispositivo Medico di classe I non sterile / <i>Medical Device Class I non sterile</i>	<i>Classification:</i>
Destinazione d'uso:	Arresto della circolazione sanguigna in un prelievo, iniezione endovenosa e/o per arrestare un'emorragia/ <i>Stopping the blood circulation in a blood collection, injection intravenous and / or to stop bleeding</i>	<i>Intended use:</i>
Lunghezza:	mm 350 +/- 5%	<i>Length:</i>
Diametro interno:	mm 6 +/- 5%	<i>Internal diameter:</i>
Diametro esterno:	mm 8 +/- 5%	<i>Outer diameter:</i>
Imballo:	Scatola da 100 pezzi / <i>Box of 100 pieces</i>	<i>Packaging:</i>
Materie Prime:	Lattice di gomma naturale; Ossido di zinco (ZnO) assente; MBT assente/ <i>Natural rubber latex; Zinc oxide (ZnO) absent; absent MBT</i>	<i>Raw material:</i>
Colore:	Biondo/ <i>Blond</i>	<i>Color:</i>
Caratteristiche Organolettiche:	In taluni casi un viraggio di colore dovuto alle radiazioni solari non compromette le caratteristiche dinamometriche del prodotto al punto da renderlo inutilizzabile: una luce fredda è meno deleteria di una luce calda, è infatti il connubio di radiazioni ed elevata temperatura che produce l'effetto di un invecchiamento accelerato / <i>In certain cases, a change in color due to solar radiation does not affect the torque characteristics of the product to the point of making it unusable: a cold light is less deleterious to a warm light, is in fact the combination of radiation and high temperature which produces the effect of accelerated aging</i>	<i>Sensory characteristics:</i>



Biosigma SpA

a **Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy |
Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 302228
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
27/10/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Condizioni di stoccaggio ed uso	<p>Evitare: luce solare e calore. Mantenere a temperatura ambiente. Evitare il contatto con lubrificanti di ogni genere (oleosi, metallici), ed il contatto di rame e sue leghe. Evitare la conservazione del prodotto sotto tensione e/o deformazione meccanica permanente, al fine di evitare il generarsi di crepe che ne compromettono irrimediabilmente l'utilizzo.</p> <p>Il prodotto ha una validità di tre anni. <i>Avoid: sunlight and heat. Keep at room temperature. Avoid contact with lubricants of any kind (oil, metal), and the contact of copper and its alloys. Avoiding the storage of the product under tension and / or permanent mechanical deformation, in order to avoid generation of cracks which irreparably compromise the use.</i></p>	<i>Storage and handling conditions:</i>
Avvertenze:	Contiene gomma di lattice naturale, che può causare reazioni allergiche. / <i>It contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions</i>	<i>Warnings:</i>
Sanitizzazione:	Lavaggio con sapone neutro (marsiglia) e risciacquo con acqua corrente. <i>Wash with mild soap (Marseille) and rinse under running water.</i>	<i>Sanitization</i>
1° emissione:25/05/2001	Rev.03 del 23/02/2012	