



**Biosigma S.p.A.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |  
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**

Aggiornamento  
06/04/2021

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

**REF: BSI109**



### **KITO-FIX CITOLOGICO**

Fissativo spray per citologia ecologico.  
Fissa i prelievi citologici su vetrini garantendone una lunga conservazione.  
Non contiene propellenti dannosi per l'ozono.

**Prodotto con marchio CE - conforme alla  
Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000  
CE Marked product - manufactured in  
compliance with 98/79/CE Directive  
CND: W01030705**

### **COMPONENTI:**

Kito-Fix si compone di una miscela di alcool e polietilenglicoli appositamente studiata per garantire una fissazione degli strisci citologici rapida e di elevata qualità.

### **MODALITÀ D'USO**

Kito-Fix ricopre la cellula con una pellicola resistente e solubile che ne protegge i particolari nucleari e la morfologia cellulare per l'esame microscopico.

La preparazione degli strisci avviene in modo tradizionale e dopo l'applicazione di Kito-Fix i vetrini sono pronti per l'invio in laboratorio.

Lo striscio citologico trattato con Kito-Fix può essere colorato direttamente senza più passaggi in alcool o solventi.

Spruzzare il prodotto tenendolo ad una distanza di circa 15 cm dal vetrino. Il prodotto asciuga rapidamente e forma una sottilissima pellicola atta a conservare nel tempo il vetrino. Il dispositivo deve essere conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore. Il tempo di conservazione del prodotto, a confezione integra, è di 5 anni.

<b>Fabbricante</b>	<b>KALTEK SRL</b>	<b>Manufacturer</b>
<b>CODICE del Fabbricante</b>	<b>2247</b>	<b>Manufacturer ITEM CODE</b>
<b>Materiale impiegato flacone</b>	<b>POLIETILENE / POLYETHYLENE</b>	<b>Raw material – container</b>
<b>Volume</b>	<b>100 ml</b>	<b>Volume</b>
<b>Validità del prodotto</b>	<b>5 ANNI / YEARS</b>	<b>Shelf life</b>
<b>Quantità (pz):</b>	<b>1</b>	<b>Quantity (pcs):</b>