



**Biosigma s.r.l.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**

Aggiornamento  
01/12/2016

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

**REF: BSI109**

**KITO-FIX CITOLOGICO**

Fissativo spray per citologia ecologica.

Fissa i prelievi citologici su vetrini garantendone una lunga conservazione.

Non contiene propellenti dannosi per l'ozono.

**CND: W01030705**



**COMPONENTI:** Kito-Fix si compone di una miscela di alcool e polietilenglicoli appositamente studiata per garantire una fissazione degli strisci citologici rapida e di elevata qualità.

### MODALITÀ D'USO

Kito-Fix ricopre la cellula con una pellicola resistente e solubile che ne protegge i particolari nucleari e la morfologia cellulare per l'esame microscopico.

La preparazione degli strisci avviene in modo tradizionale e dopo l'applicazione di Kito-Fix i vetrini sono pronti per l'invio in laboratorio.

Lo striscio citologico trattato con Kito-Fix può essere colorato direttamente senza più passaggi in alcool o solventi.

Spruzzare il prodotto tenendolo ad una distanza di circa 15 cm dal vetrino. Il prodotto asciuga rapidamente e forma una sottilissima pellicola atta a conservare nel tempo il vetrino. Il dispositivo deve essere conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore. Il tempo di conservazione del prodotto, a confezione integra, è di 5 anni.

**Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000**  
**CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive**

Fabbricante	KALTEK SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	2247	Manufacturer ITEM CODE
Materiale impiegato flacone	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material – container
Volume	100 ml	Volume
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	1	Quantity (pcs):